


NOTA INFORMATIVA
Denominazione: REFLEX L45
Data: 02/10/2024 Rev: 01
FABBRICANTE

 REFLEX SpA
 Via Passeri, 2 46019 VIADANA (MN)
 Tel.: + 39 0375 758891 Fax + 39 0375 464504
info@reflexx.com
www.reflexx.com

Imballo

Cod./Taglie	Confezione	Cartone
L45/ S	8032891630587	8032891635582
L45/ M	8032891630594	8032891635599
L45/ L	8032891630600	8032891635605
L45/ XL	8032891630617	8032891635612

DESCRIZIONE: ■ Guanto monouso per ispezione senza polvere non sterile ■ **Materiale:** lattice di gomma naturale ■ **Forma:** ambidestro; cinque dita, bordino arrotolato ■ **Colore:** nero ■ **Finitura:** internamente clorinato; superficie esterna microruvida ■ **Imballo:** 100 pezzi/scatola; 10 scatole/cartone ■ **ISO 2859:** AQL 1.5 (livello G1) per assenza di fori; AQL 2.5 (livello G1) per maggiori difettosità; AQL 4 (livello G1) per minori difettosità

CONFORMITA' E PRESTAZIONI

classe I

Dispositivo Medico

 Reg UE 2017/745- EN 455 1,2,3 & 4
 (CND T010201 GUANTI NON CHIRURGICI IN LATTICE)


cat I

Dispositivo Protezione Individuale cat I solo per rischi minori
 EN 420:2003 + A1 2009

DIMENSIONI		
Cod./Taglia	Lungh. min(mm)	Largh. (±5 mm)
L45/ S (7)	240	85
L45/ M (8)	240	95
L45/ L (9)	240	106
L45/ XL (10)	240	116

Spessore mm	Palmo (+/- 0.03)	0.12
EN 455-2:2009/A1	Carico di rottura	≥6 N

CONSIGLI DI UTILIZZO Guanto polivalente a protezione della mano e/o del prodotto manipolato, può essere utilizzato anche per usi generici ■ Evitare il contatto con elementi chimici aggressivi e attività che potrebbero lacerare il guanto ■ **AVVERTENZE** Prima di utilizzare il prodotto provarlo nella reale condizione di utilizzo ■ Dispositivo soggetto ad usura, si raccomanda la sostituzione frequente e in tutti i casi in cui si vedano imperfezioni ■ Indossare i guanti con le mani asciutte e pulite ■ Il prodotto contiene lattice di gomma. Può causare reazioni allergiche di ipersensibilità di tipo I e IV. In caso di reazione, sospendere l'utilizzo e consultare un medico ■ L'utilizzatore deve segnalare al fabbricante e all'autorità competente eventuali incidenti occorsi durante l'uso del dispositivo ■ **CONSERVAZIONE E SMALTIMENTO** Conservare i guanti nella confezione originale, in luogo asciutto ■ Conservare a temperatura ambiente ■ Non esporre alla luce del sole e a fonti di calore ■ La scadenza è di 3 anni a partire dalla data di produzione, indicata sulla confezione di vendita, ed è valida per prodotto debitamente conservato ■ Smaltire secondo le normative locali ■ Dichiarazione di Conformità su www.reflexx.com